

機械器具（05）麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 再使用可能な麻酔用呼吸回路バッグ（37709000）


麻酔用シリコンバッグ

【警告】

滅菌・消毒をおこなうこと。
[相互感染を防止するために実施すること。]
本品は可燃性麻酔薬には使用できない。

【形状・構造及び原理等】

形状

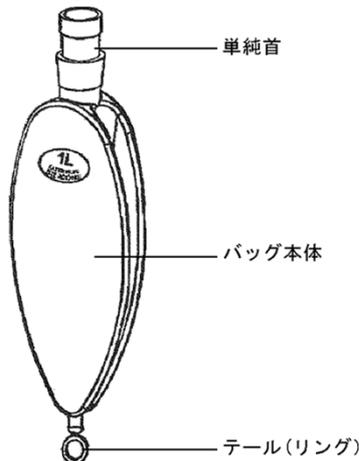

サイズ表

番号	容量 (L)	口元色	(mm)			
			全長	幅	口元	厚さ
SL0522	0.5	黄	245	85	φ21	1
SL1022	1	灰	284	90	φ21	1
SL2022	2	青	323	102	φ21	1
SL3022	3	緑	410	105	φ21	1

原材料：シリコンゴム

【使用目的又は効果】

呼吸回路の設計により回路の吸気側又は呼気側に接続して使用し、呼吸回路中において呼吸ガスを保存すること。

【使用方法等】

- 患者の身体的条件や臨床的判断を考慮して、患者に適したサイズを選択する。
- 本品を呼吸回路の吸気又は呼気リムに取り付ける。
- 患者の肺容積を考慮して加圧する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 多頻度の使用により本品にひび割れ、水泡、穴、ゴムの軟化等の破損・劣化が認められる場合は使用しない。
 - 本品がしっかりと接続されていることを確認する。
- 使用方法に関連する使用上の注意
 - 使用前に洗浄・滅菌をする。
（【保守・点検に係る事項】欄を参照）
 - 以下の製品と併用しない
 - 十分な接続が維持できない製品。
 - 接続により閉塞をおこす製品。
 - 離脱が困難な製品。
 - 取り付け、取り外しは、単純首を持っておこなうこと。本体を引っ張らないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - 高温多湿を避けて保管する。
 - 直射日光を避け、通気性の良い場所に保管する。
 - 水に濡れないように保管する。
 - 蛍光灯やオゾンを発生する機器の周辺に保管しない。
 - 過度な重みがかからないように配慮する。
- 使用期限
本品の使用期限は5年を推奨します。
ただし、使用頻度に応じ劣化や破損が認められた場合は医療用廃棄物として処分して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 清掃方法
 - 本品使用后、薬液または洗浄剤を用いて清掃を行う。
薬品濃度及び洗浄時間は、薬液または洗浄剤の製造業者の推奨に従う。
 - 予備洗浄を行う場合は、表面に傷を与えない軟性のブラシを使用する。
- 滅菌方法
 - エチレンオキシドガス滅菌
 - 滅菌条件は、滅菌装置の製造元の指示及び公的機関のガイドラインに従う。
 - ガス透過性のある包装材を使用する。
 - 残留エチレンオキシドガスのエアレーションには十分な時間をかける。
 - 高压蒸気滅菌
 - 134℃、5分間の滅菌条件で実施する。
 - 滅菌器に入れる前に製品を十分に乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
田中ゴム株式会社
電話番号
048-797-5681

外国製造所の名称

ベスメド・ヘルスビジネス社ウーコン第3通り
Besmed Health Business Corp. Wu-kong 3rd Rd.
国名 台湾